

printodent GR-10 guide

Drucker: Anycubic Photon Mono X

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	50	2,5 / 15
405	100	3,8 / 50

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewähr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - [dentoo.com](https://www.dentoo.com)*