

DRUCKPARAMETER

printodent GR-16 Xray

Drucker: Asiga

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	12.16
385	100	16.213
405	50	13.097
405	100	16.375

Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com