

DRUCKPARAMETER

printodent GR-11.1 tray

Drucker: Shining3D L4D

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	100	7,8 / 35-15 / 40-18

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewähr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com*