

DRUCKPARAMETER

printodent GR-13 model

Drucker: Asiga

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Lichtdosis (mJ/cm2)
385	50	18.062
385	100	26.272
405	50	15.02
405	100	20.96

Empfohlene Lichtdosis Max(UV). Angaben aus der pro3dure-Druckervalidierung, ohne Gewaehr. Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com