

DRUCKPARAMETER

printodent GR-13 model

Drucker: Prusa Medical One

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	50	5,7 / 25
405	100	7,5 / 25

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewaehr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - dentoo.com*