

DRUCKPARAMETER

printodent GR-17 temporary

Drucker: Organical X1N

Wellenlaenge (nm)	Schichtstaerke (um)	Belichtungszeit (s)
405	50	3 / 56
405	100	4,3 / 70

*Belichtungszeiten Format: Burn-In / normale Belichtung (Sekunden). Angaben aus der pro3dure-Druckvalidierung, ohne Gewähr.
Verbindlich ist die aktuelle Gebrauchsanweisung. Stand: 06.07.2026 - [dentoo.com](https://www.dentoo.com)*